

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Cervical-Orthese_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27244
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021



Gebrauchsanweisung Cervical Orthese

Sonderanfertigung

Sehr geehrte/r _____
Name/Vorname

Sie haben von Ihrem orthopädie-technischen Fachbetrieb eine für Sie individuell hergestellte Schiene erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und **Sicherheitshinweise**. Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Zusammenstellung, in der die Ausführung Ihrer persönlichen Orthese angegeben ist.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

- ➔ Wichtige Informationen zu Ihrer Orthese
- ➔ Beschreibung der Einzelbestandteile/des Zubehörs
- ➔ Medizinisch-therapeutische Aspekte
- ➔ Handhabung/Funktionsweise/Risiken
- ➔ Inspektion, Wartung

Die für Sie zutreffenden Informationen und Warnhinweise sind mit einem ☒ gekennzeichnet.

Wichtige Informationen zu Ihrer Lagerungsschiene

Einsatz und Einschränkungen des Gebrauchs

Ihre Cervical Orthese ist ein orthopädie-technisches Hilfsmittel, das für Sie individuell angefertigt wurde. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann durch Überlastung zu Materialermüdung und im Extremfall zur Schädigung der Orthese führen.

Die Benutzung der Orthese im Wasser, wenn nicht eigens dafür gebaut, und der Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln sind zu vermeiden. Jegliche Erwärmung der Orthese über 50°C muss vermieden werden, weil dies zu Eigenschafts- und Passformveränderungen führen kann. Ebenso ist die Orthese von offenen Flammen fernzuhalten.

Medizinisch-therapeutische Aspekte

Entsprechend der ärztlichen Diagnose kommen verschiedene Cervicalorthesentypen zum Einsatz, die verschiedene Funktionen übernehmen. Jegliche dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker. Bei Empfindungsstörungen ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen täglich, beim Anziehen der Orthese und mehrmals zwischendurch, durchzuführen (Druckstellenprophylaxe). Ein Spiegel erleichtert die Kontrolle an schlecht erreichbaren Körperregionen.

Wenden Sie sich bei allen Problemen mit Ihrer Orthese an Ihren orthopädie-technischen Fachbetrieb.

Körperpflege und Hygiene

Auch die von der Orthese umschlossenen Körperteile bedürfen einer vermehrten Pflege. Tägliche Reinigung mit hautfreundlicher Seife ist daher dringend angeraten.

Erstellt durch (Autoren): Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Geprüft durch: Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Freigegeben durch: Pfister, Sebastian am 30.08.2019	Seite 1 von 3
--	---	--	------------------

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Cervical-Orthese_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27244
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021

Handhabung/Funktionsweise/Risiken

Die Orthese ist entsprechend der Einweisung durch Ihren Orthopädie-Techniker so anzulegen, dass ein sicherer Sitz der Cervical Orthese am Körper gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Aber immer **fest genug** um Reibung und Scheuern aus zuschließen.

Inspektion, Wartung

Die Cervical Orthese ist vor jedem Tragen auf Beschädigungen zu untersuchen. Ebenso muss die Funktionsfähigkeit der Verschlüsse überprüft werden. Bei allen Auffälligkeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Orthopädie-Techniker in Verbindung. Im Anhang ist der nächste Kontrolltermin für Ihre Orthese eingetragen. Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Sie erstreckt sich nur auf Leistungen, die von unserem orthopädie-technischen Fachbetrieb vorgenommen wurden.

Varianten und Komponenten

Ihre Orthese weist die nachfolgend angekreuzten Varianten auf.

Cervical Orthese 2-teilig Cervical Orthese 1-teilig mit Verschluss

Material mit Hautkontakt: Verschluss Kräuseltrikot /
Baumwolltrikot

Sonstige Bemerkungen: _____

Lebensdauer: ca. 6 Monate

Datum Unterschrift des verantwortlichen Technikers

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH . Ein Unternehmen des UKM
Geschäftsführer: Sebastian Pfister . Prokuristen: Frank Hermeyer, Dr. Dominic Zimmer
Bankverbindung: IBAN: DE31 4007 0080 0038 1020 00 . BIC: DEUTDE3B400

Erstellt durch (Autoren): Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Geprüft durch: Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Freigegeben durch: Pfister, Sebastian am 30.08.2019	Seite 2 von 3
---	---	---	------------------

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Cervical-Orthese_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27244
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021

Steuernummer: 336/5828/0524

Erfüllungsort und Gerichtsstand Münster . Amtsgericht Münster . HR B 14718

Erstellt durch (Autoren):	Geprüft durch:	Freigegeben durch:	Seite 3 von 3
Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Pfister, Sebastian am 30.08.2019	