

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Lagerungsschienen_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27246
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021



Gebrauchsanweisung Lagerungsschiene

Sonderanfertigung

Sehr geehrte/r _____
Name/Vorname

Sie haben von Ihrem orthopädie-technischen Fachbetrieb eine für Sie individuell hergestellte Schiene erhalten. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen und **Sicherheitshinweise**. Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Zusammenstellung, in der die Ausführung Ihrer persönlichen Schiene angegeben ist.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.

- ➔ Wichtige Informationen zu Ihrer Schiene
- ➔ Beschreibung der Einzelbestandteile/des Zubehörs
- ➔ Medizinisch-therapeutische Aspekte
- ➔ Handhabung/Funktionsweise/Risiken
- ➔ Inspektion, Wartung

Die für Sie zutreffenden Informationen und Warnhinweise sind mit einem ☒ gekennzeichnet.

Wichtige Informationen zu Ihrer Lagerungsschiene

Einsatz und Einschränkungen des Gebrauchs

Ihre Lagerungsschiene ist ein orthopädie-technisches Hilfsmittel, das für Sie individuell angefertigt wurde. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann durch Überlastung zu Materialermüdung und im Extremfall zum Bruch der Schiene führen.

Die Benutzung der Schiene im Wasser, wenn nicht eigens dafür gebaut, und der Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln sind zu vermeiden. Jegliche Erwärmung der Schiene über 50°C muss vermieden werden, weil dies zu Eigenschafts- und Paßformveränderungen führen kann. Ebenso sind die Schienen von offenen Flammen fernzuhalten. Welche Leistungsfähigkeit Sie mit der Schiene erreichen, hängt vom individuellen Krankheitsbild und der Gesamtkonstitution ab. Ob begleitende therapeutische Maßnahmen (z.B. Krankengymnastik) Ihre Leistungsfähigkeit unterstützen können, besprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt, ebenso die tägliche Tragezeit.

Beschreibung der Einzelbestandteile/des Zubehörs

Die Lagerungsschiene besteht aus einem Fußteil und einem Unterschenkelteil und eventuell einem Oberschenkelteil.

bei korrigierenden Schienen ist das Fußteil starr mit dem Unterschenkelteil verbunden

Medizinisch-therapeutische Aspekte

Entsprechend der ärztlichen Diagnose kommen verschiedene Lagerungsschientypen zum Einsatz, die verschiedene Funktionen übernehmen. Die Kombination verschiedener Funktionen in einer Schiene ist möglich. Jegliche dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker. Bei Empfindungsstörungen im betroffenen Bein ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen täglich, beim Anziehen der Schiene und mehrmals zwischendurch, durchzuführen (Druckstellenprophylaxe). Ein Spiegel erleichtert die Kontrolle an schlecht erreichbaren Körperregionen.

Erstellt durch (Autoren): Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Geprüft durch: Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Freigegeben durch: Pfister, Sebastian am 30.08.2019	Seite 1 von 3
--	---	--	------------------

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Lagerungsschienen_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27246
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021

Durch Körpergewichtsveränderungen oder –schwankungen sowie Wachstum kann es zu Paßform- und infolge derer auch zu Funktionsmängeln kommen.

Wenden Sie sich bei allen Problemen mit Ihrer Schiene an Ihren orthopädie-technischen Fachbetrieb.

- Wird die Schiene in der Wachstumsphase eingesetzt, muss diese an die sich verändernde Körpergröße angepasst werden. Da das Wachstum jedoch häufig schubweise verläuft und sich nicht an den Kontrollintervallen orientiert, sollten Sie selbst regelmäßig eine kritische Paßformkontrolle durchführen.

Körperpflege und Hygiene

Die von der Schiene umschlossenen Körperteile benötigen eine vermehrte Pflege. Tägliche Reinigung mit hautfreundlicher Seife ist daher dringend angeraten.

Handhabung/Funktionsweise/Risiken

Die Schiene ist entsprechend der Einweisung durch Ihren Orthopädie-Techniker so anzulegen, dass ein sicherer Sitz der Lagerungsschiene am Körper gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Aber immer **fest genug** um Reibung und Scheuern aus zuschließen.

Inspektion, Wartung

Die Lagerungsschiene ist vor jedem Tragen auf Beschädigungen zu untersuchen. Ebenso muss die Funktionsfähigkeit der Verschlüsse überprüft werden. Bei allen Auffälligkeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Orthopädie-Techniker in Verbindung. Im Anhang ist der nächste Kontrolltermin für Ihre Schiene eingetragen. Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Sie erstreckt sich nur auf Leistungen, die von unserem orthopädie-technischen Fachbetrieb vorgenommen wurden.

Varianten und Komponenten

Ihre Schiene weist die nachfolgend angekreuzten Varianten auf.

- Nachtlagerungsschiene _____

Material mit Hautkontakt: Filz Leder
Einsatzbereich: beim Liegen beim Sitzen keine Belastung

Sonstige Bemerkungen: _____

Lebensdauer der Schiene: ca. ½ jährlich Wartungsintervall der Verschlüsse: ca. ¼ jährlich

Datum Unterschrift des verantwortlichen Technikers

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH . Ein Unternehmen des UKM
Geschäftsführer: Sebastian Pfister . Prokuristen: Frank Hermeyer, Dr. Dominic Zimmer
Bankverbindung: IBAN: DE31 4007 0080 0038 1020 00 . BIC: DEUTDE3B400
Steuernummer: 336/5828/0524

Erstellt durch (Autoren): Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Geprüft durch: Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Freigegeben durch: Pfister, Sebastian am 30.08.2019	Seite 2 von 3
--	---	--	------------------

UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH	Information Info_Gebrauchsanweisung Lagerungsschienen_UKM ProTec GmbH	Version 5 / Dok.-Nr. 27246
		Stand: 30.08.2019
		Nächste Revision: 29.08.2021

Erfüllungsort und Gerichtsstand Münster . Amtsgericht Münster . HR B 14718

Erstellt durch (Autoren):	Geprüft durch:	Freigegeben durch:	Seite 3 von 3
Brockmann, Wolfgang; Linkemeyer, Ludger	Kloth, Claudia am 30.08.2019 (formal) Brockmann, Wolfgang am 30.08.2019 (inhaltlich)	Pfister, Sebastian am 30.08.2019	

Wichtiger Hinweis: Dieser Ausdruck ist eine unkontrollierte Kopie. Gültig ist nur die aktuelle Version in Nexus Curator.